

リストバンド T の取り付け方法

⚠ 注意

<ご使用上の注意>

リストバンド T を手首など直接肌に装着する場合、装着される方の体質(アレルギーや敏感肌など)により、かぶれ・湿疹などの症状が現れるおそれがあります。

また、装着したときの状態によっても同様の症状が現れるおそれがありますので、以下の点に留意の上ご使用ください。


- リストバンド T 装着部に皮膚障害、傷などがある場合は使用しないでください。
- リストバンド T 全体が肌に密着しないよう指 1 ～ 2 本が入る程度の余裕を持たせて装着し、できるだけ通気性を確保してください。
- テープが完全に固着するまで一時間ほどかかります。
- シリコーン素材を使用しております。シリコーンアレルギーの方はご使用をお控えください。
- リストバンド T を装着した部位(手・足など)が皮膚と密着した状態で長時間圧迫されますと、皮膚が赤くなることがありますので、できるだけ通気性を確保してください。
- 乳幼児にご使用される際は、皮膚の状態を十分に確認しながらご使用ください。
- 取り付け時、テープ部の糊が肌に触れないように注意してください。
- テープ部の糊が肌に付着した場合には、きれいに洗い流してください。

🔑 重要


- 印刷箇所を爪や軟こうなどでこすると、薄くなることがあります。
- 印刷直後は印字の定着が十分ではないことがありますので取り扱いには注意してください。
- インクリボンはセット品のリストバンド T 用リボンを使用してください。
- リストバンド T 使用中、皮膚に違和感、異常があらわれた場合、ただちに使用を中止し医師に相談してください。

取り付け

- ① リストバンド T のテープ部(裏面)の台紙を剥がします。

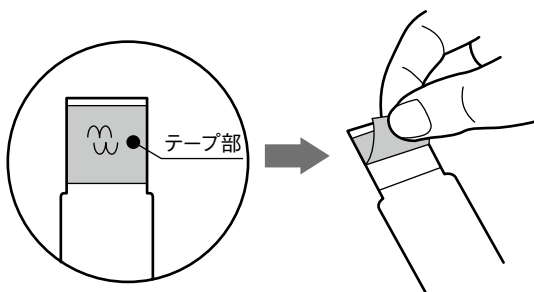

- ② 装着するところへリストバンド T をあてがい、指 1 本～ 2 本程度の余裕を持たせた状態で、テープを固定します。

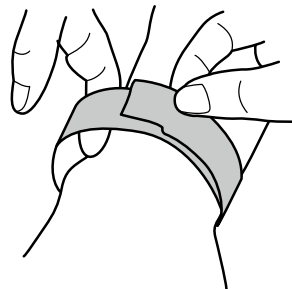


⚠ 注意

<取り付け時の注意>

糊の部分がリストバンド T からのみ出す、リストバンド T の穴の部分に貼り付けるなど、糊の部分が肌に直接触れるおそれのある取り付けをしないでください。

- ③ 強く圧着し、テープをしっかりと固定してください。

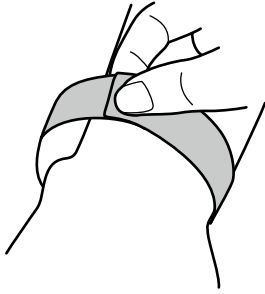


- ④ 装着完了時、リストバンド T と皮膚の間に指 1～2 本程度の余裕があるか確認してください。余裕が無い場合は、新品と交換してください。




取り外し

- ① リストバンド T の端の部分をつまみ、テープをはがします。

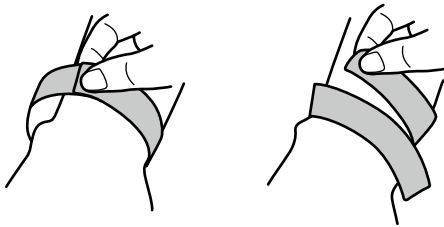

または、巻き付けたリストバンド T の内側の余り分を引っ張ってはがすこともできます。

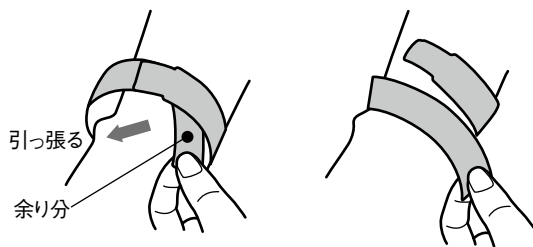

リストバンド T の印刷方法について

リストバンド T に印刷する方法は「リストバンド T の印刷方法」マニュアルを参照してください。マニュアルは MultiCoder 503L3T シリーズの添付ソフトウェア CD-ROM に収録しております。また、以下の URL からダウンロードすることも可能です。

NEC コーポレート サイト
<http://jpn.nec.com/printer/label/>
⇒ ダウンロード