

リストバンド (E-ブレス) の取り付け方法

⚠ 注意

ご使用上の注意

リストバンドを手首など直接肌に装着する場合、装着される方の体質（アレルギーや敏感肌など）により、かぶれ・湿疹などの症状が現れるおそれがあります。

また、装着したときの状態によっても同様の症状が現れるおそれがありますので、以下の点に留意の上で使用ください。

- 装着部に皮膚障害、傷などがある場合は、使用しないでください。
- リストバンド全体が肌に密着しないよう指1~2本が入る程度の余裕を持たせて装着し、できるだけ通気性を確保してください。
- 皮膚の状態を1~2回/日程度確認しながらご使用ください。

もし、皮膚に異常が現れた場合は、ただちに取り外し、皮膚科の医師へご相談ください。


* リストバンドの保管方法や取り扱いについては、プリンター本体のマニュアルに準じてください。

🔑 重要

- 印刷箇所を爪や軟こうなどでこすると、薄くなることがあります。
- 印刷直後は印字の定着が十分ではないことがありますので取り扱いには注意してください。
- リボンは専用リボンを使用してください。
- いったん固定したホックを取り外すことはできません。無理にこじ開けないでください。


① リストバンドを型どおりにはがします。

はがしにくい場合は、リストバンドの端の部分をはがしてから、はがした部分を持って図の矢印方向へ引っ張ってください（リストバンドは両端のどちら側からでも切り離すことができます）。

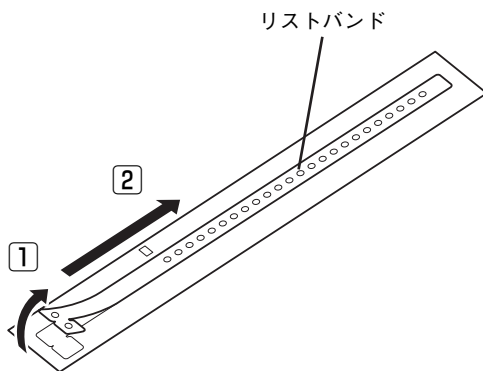

② リストバンドの穴にホックを取り付けます。

ホックはオス側が下、メス側が上です。

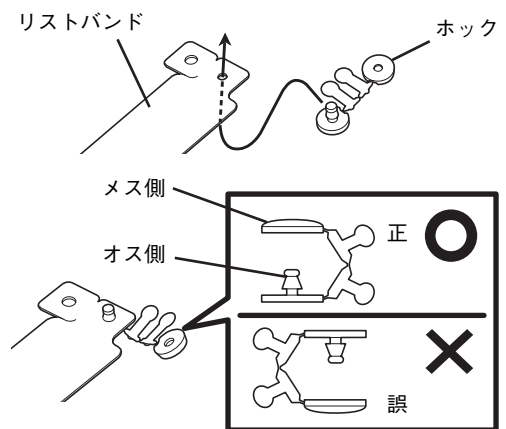


リストバンド用ホック使用上のご注意

1. ホックの留め具は裏表がありますので向きに注意してください。
2. 留める際は強く押し込みすぎないようにしてください。




- ③ 装着するところへリストバンドをあてがいます。

オス側ホックの下に人差し指または中指をあてがい、ベルト位置を決めます。その際、バンドと皮膚との間に指1本から2本分の余裕を持たせた状態にしてください。

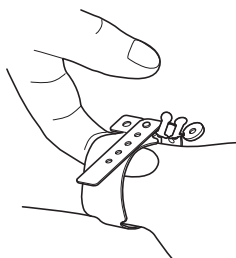


ホックを固定する穴の位置を決めた後、余分なバンドをはさみで切ります。

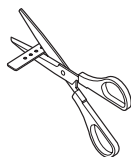


- ④ リストバンドの耳を折り返してホックのピンの上にかぶせ、さらにホックのピンにメス側をかぶせて固定します。


オス側ホックの下に人差し指または中指をあてがい、「パチッ」と音にするまでメス側ホックを押ししてください。

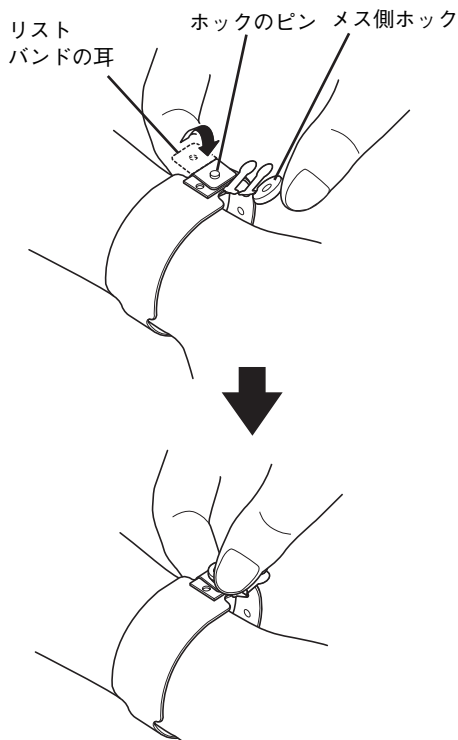

- ⑤ ホックのオス・メスをつないでいる部分を指でねじって取り外してください。

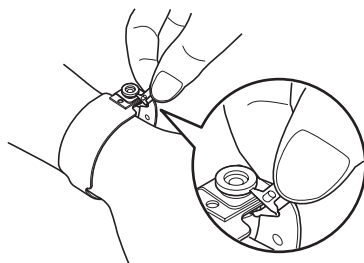

- ⑥ 装着完了時の状態が下図のとおりです。リストバンドと皮膚の間が指1本から2本までの余裕を持たせた状態で装着完了です。

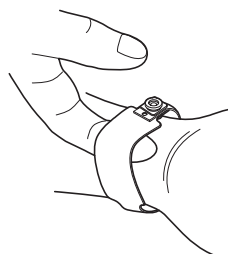

リストバンドを取り外すときは、はさみで切ります。